

Installationsanleitung

H2Otap 4000 - H2Ower 4500

Bitte beachten Sie sorgfältig die Hinweise:



Lagerung

Bewahren Sie die Filter sauber, trocken und in der Originalverpackung auf. Öffnen Sie die Filterverpackung erst kurz vor der Installation und Verwendung. Bitte verwenden Sie keine Filter mit beschädigter Verpackung oder wenn dieser schon vor der Verwendung geöffnet wurde.



Installation

Beachten Sie die Vorgaben für kontrollierte Umgebungen, wie Intensivstationen, Operationssäle und Orte, an denen die Verwendung von OP-Kitte, Hauben und Masken sowie sterile Handschuhe etc. empfohlen sind.



Verwendung

3 Monate Einsatzdauer



1 Hände reinigen und desinfizieren. Wir empfehlen die Verwendung von sterilen Handschuhen.



2 Benutzen Sie zum Entnehmen des zu wechselnden Filters einen einzelnen Beutel.



3 Zum Entfernen des Filters müssen Sie den Knopf im Anschluss drücken, und gleichzeitig den Filter langsam nach unten ziehen.



4 Öffnen Sie die Verpackung von oben, ohne den Filter zu berühren.



5 Platzieren Sie den Filter wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Wenn Sie ihn richtig installiert haben, hören Sie ein „Klick“-Geräusch.



6 Entfernen Sie die Verpackung des Filters, sobald dieser installiert ist.



7 Öffnen Sie den Wasserhahn, um zu prüfen, ob das Wasser richtig fließt. Wenn ein Problem vorliegt, ist er falsch installiert. Folgen Sie bitte noch einmal den genannten Schritten.



8 Bringen Sie einen Aufkleber mit dem Installationsdatum an, um Änderungen zu kontrollieren.



9 Um eine retrograde Kontamination zu vermeiden, wechseln Sie den Filter bitte zum angegebenen Datum.



10 Es wird dringend empfohlen, die Hände zu reinigen und erneut zu desinfizieren.